

MATELAS ANTI-ESCARRES ADL®

Arsos® Light

Stade 4 (EPUAP) ref. 111 500

Matelas anti-escarres AIR et MOUSSE, pour la PREVENTION des patients à faible et haut risque d'escarres et le traitement des ESCARRES de STADE 4 (EPUAP).
Patients de 50 à 150 kg.



NOUVEAU CONCEPT HYBRIDE CELLULE AIR & MOUSSE



Matelas à air, avec MOUSSE INTEGREE : POMPE DIGITALE Dexos® light

- **10 cellules AMOVIBLES INDIVIDUELLEMENT**
- noyau de chaque cellule en mousse polyuréthane cerclé d'air. Zones périphériques **RENFORCEES**
- Nouveau système CPR (Réa Cardio Pulmonaire) évite les ouvertures accidentelles.
- **HOUSSE** polyuréthane de haute qualité, **PERMEABLE à l'AIR**, imperméable aux liquides.
Lavable à 95°C et sèche linge à 50°C maximum.


- **alarme visuelle** ou visuelle et sonore
- Mode en pression **statique** ou **alternée**
- Pression alternée par module de 3 cellules, avec des cycles de 5 à 20 min. au choix
- **PRESSION REGLABLE** au confort du patient
- **pompe SILENCIEUSE**. système anti-vibrations (AVS),
- utilisation très simple
- **verrouillable**

MATELAS ANTI-ESCARRES ADL®

Arsos® Light

Stade 4 (EPUAP) ref. 111 500

CONCEPT HYBRIDE CELLULE AIR & MOUSSE création ADL®

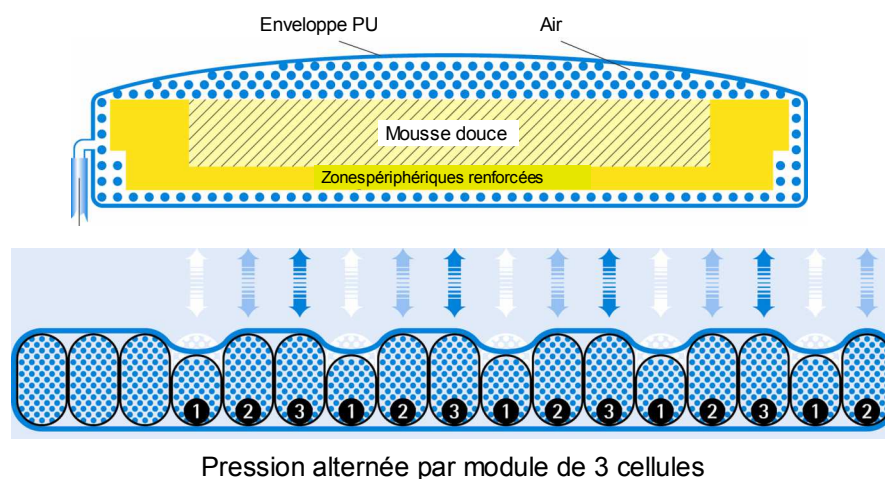

AVANTAGES :

FIABILITE

QUALITE DE FABRICATION

CONFORT du patient (système air et mousse)

MAINTENANCE facilitée (cellules interchangeables très facilement)

POMPES SILENCIEUSES, REGLABLES aisément selon les patients

| ARSOS® LIGHT | Matelas | Housse | Pompe DEXOS® LIGHT wds |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| Matière | Polyuréthane | PU - perméable à l'air et imperméable aux liquides. Lavable à 95°C et sèche-linge à 50°C maxi | PVC |
| Dimensions en cm | 200 x 90 x 12 (gonflé) | - | - |
| Poids en kg | 13 kg | 0,9 kg | 1,5 kg |
| Garantie | 2 ans | - | 2 ans |
| Puissance électrique | - | - | 230 V / 8 W / 50Hz |
| Fusible | - | - | 500 mA / lent |
| Nettoyage | Désinfection par auto-clave | Lavable à 95°C / sèche linge à 50°C maxi. | Désinfection avec un chiffon |

| | |
|-------------|--|
| Indications | Prévention des patients à risque et traitement des escarres Stade 1 à 4 (EPUAP) |
|-------------|--|

